

BELATEARS INTENSIVE БЕЛАТИРС ИНТЕНСИБ

ТИББИЙ БУЮМНИ ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Тиббий буюмнинг савдо номи: Белатирс Интенсив

Таркиби: гиалурон кислотаси, алоэ вера

Чиқарилиш шакли: кўз томчилари

Таркиби:

Гиалурон кислотаси 0,3%, алоэ вера гели, динарий здетати (ЭДТА), лимон кислотаси, натрий цитрати, натрий глутамат, натрий гидроксиди, ионсизланган сув. **Маҳсулотнинг таърифи:** 0,3% гиалурон кислота ва алоэ вера гели билан ёллантирувчи, намлантирувчи ва софлантирувчи кўз эритмаси. Маҳсулот консервланган сакламайди.

Таъсир этиш механизми:

Белатирс Интенсив таркибидаги гиалурон кислотаси тинчлантирувчи, пленка ҳосил қилувчи, қайшоқлантирувчи, мукоадгезив, мукоиметик, гипроскопик ва намлантирувчи таъсир кўрсатади. Белатирс Интенсив кўзларни юмшатишга ва ҳимоялашга кўрсатилади, контакт линзаларни намлантиради ва уларни қўлланишида қулайлигини оширади. Кўзларнинг кўзғалишида, аллергик реакцияларда ва кўзларнинг қуруқлик ҳиссиётини камайтириш учун ёрдамчи восита сифатида кўрсатилиб, кўз томчилар юмшатувчи ва софлантирувчи таъсир кўрсатади..

Қўлланилиши:

- куруқ ва чарчаган кўзлар;
- кўз плёнкасининг ножороҳат / нопатологик ўзгаришлари;
- кўзларга атроф-муҳитнинг таъсири (шамол, чанг, ҳавонинг кондиционерлиниши, куруқ ва ифлосланган ҳаво ва ҳоказолар);
- кўзларга стресс таъсир қилишлар (узоқ мuddат компьютернинг қўлланилиши, ёритилганликнинг ноқуё шароитлари, ёрқин ёруғлик, шуълалар ва ҳоказолар);
- контакт линзаларнинг узоқ вақт қўлланилиши.

Қўллаш усули

Воситани зарурат бўйича ёки шифокорнинг буюришига биноан, ҳар бир кўзга 1 ёки 2 томчидан кунига бир ёки бир неча марта қўллаш тавсия қилинади.

Контакт линзалардан фойдаланувчи инсонлар учун - воситани тақилган линзалар устига кунига бир неча марта ёки зарурат бўйича 2-3 томчидан қўлланилсин.

1) Хар фойдаланишдан олдин кўлингизни ювинг ва бурилиш ҳаракати билан флаконнинг учидан химоя қопқоғини ечинг. Эритманинг ифлосланишини олдини олиш учун шижанинг учини бармоқларингизга ёки бошқа юзаларга тегиздирманг.

2) Дижат! Биринчи марта ишлатишдан олдин ва агар флакон узоқ вақт ишлатилмаса: ишшани учи билан пастга қаратинг ва томчи чиқмагунча насос меҳанизмини бир неча марта босинг. Энди флакон қўллаш учун тайёр.

3) Бошингизни орқага ташланг, бўш қўлингизнинг бармоғи билан пастки қовоқни секин пастга туртинг. Флаконни кўз устида вертикал ҳолатда ушлаб туринг ва кўзга бир томчи тушиши учун насос меҳанизмини босинг. Мумкин бўлган шикастланиш ва/ёки эритманинг ифлосланишини олдини олиш учун кўзинг юзасига флаконнинг учи билан тегманг.

4) Ҳар бир қўллашдан кейин флаконни махкам ёпиб қўйинг.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

- маҳсулотнинг компонентларига юқори сезувчанлик ёки аллергия.

Махсус кўрсатмалар:

Контакт линзаларни тақиб юришда, Белатирс Интенсивни линзаларни олиб ташламасдан қўллаш мумкин.

- кўзлар кўзгалганда, маҳсулотнинг қўлланилишини тўхтатинг ва мутахассисга мурожаат қилинг;
- аллергияда ёки маҳсулотнинг бирон бир компонентига юқори сезувчанлик бўлганда, қўлланилмасин;
- ютилимасин;
- флакон шикастланган бўлса, маҳсулотдан фойдаланманг;
- флакон учининг кўзга ёки қовоқга тегшидан сақланг;
- бошқа офтальмологик маҳсулотларни қўллаганда, кўз томчилари каммида 5 минут олдин ёки кейин қўллаш лозим.

Ҳомилдорлик ва лактация даври

Ҳомилдорлик ва лактацияда шифокор билан маслаҳатлашилсин.

Автомобилни ва мураккаб меҳанизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Кўз томчилари кўришнинг аниқлигини вақтинчалик йўқотилишини чақирishi мумкин. Агар бу содир бўлса, кўриш қобилиятингиз тўзил тиклангунча автомобилни ҳайдаманг ва меҳанизмларни бошқарманг.

Чиқарилиш шакли ва қадоқлаш

Кўз томчилари 10 мл.дан томизгич ва қопқоқ билан флаконда.

1 флакондан давлат ва рус тилларида қўлланилишига доир йўриқнома билан биргалликда картон қўтига жойлаштирилди.

Сақлаш шароитлари

5 °С дан 35 °С. гача бўлган ҳароратда, куруқ, иссиқлик манбаларидан узоқ бўлган жойда сақлансин. Болалар ололмайдиغان жойда сақлансин!

Яроқлик мuddати

3 йил.

Флаконни биринчи очилгандан кейин - тиббий буюм 180 кун давомида қўлланилсин.

Яроқлик мuddати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Савдо белгиси ва руйхатдан ўтказганлик

ғувҳономасининг эгаси

BELINDA LABORATORIES LLP., Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи

OMISAN FARMACEUTICI S.R.L., Италия

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тиббиётда қўллаш

маҳсулотининг сифати бўйича этирозлар

(таклифлар)ни қабул қилувчи ташкилотнинг

номланиши ва манзили:

"Amelya Pharm Service" МҲЖ,

Серкўёш кўч., 3, 100185, Тошкент ш.,

Ўзбекистон Республикаси

Тел: +99878 150-50-81, 150-50-82

E-mail: amelyapharm@gmail.com

